



HemaCut[®]

SPRAY

RYCHLE • SPRÁVNĚ • POHODLNĚ

SPREJ K HOJENÍ PORANĚNÍ KŮŽE



Odřeniny



Popáleniny



Řezné rány



HemaCut[®] SPRAY

HemaCut[®] SPRAY je zdravotnický prostředek vyvinutý Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR. Obsahuje patentovaný polymer TRISS, díky jehož struktuře sprej po aplikaci:

- vytvoří na kůži suchou, průhlednou a voděodolnou vrstvu
- chrání ránu před infekcí z vnějšku
- zajišťuje bezbolestnou a bezkontaktní aplikaci na ránu

HOJÍ PORANĚNÍ JAKO JSOU

- Odřeny
- Popáleniny I. a IIa stupně
- Řezné, sečné a tržné rány
- Puchýře a další povrchová poranění



Den 0

Den 2 – večer


Den 3 – ráno

Den 6 – ráno



JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT HemaCut® SPRAY

1. Ránu omyjte pod tekoucí vodou a nechte uschnout nebo opatrně osušte.
2. Na **menší rány** stříkněte **HemaCut® SPRAY** ze vzdálenosti 1 – 2 cm tak, aby rozptyl spreje byl menší a mířil na ránu.
3. Na větší rány stříkněte **HemaCut® SPRAY** ze vzdálenosti 4 – 8 cm podle rozsahu rány tak, aby byl sprej aplikován na co největší plochu rány najednou.

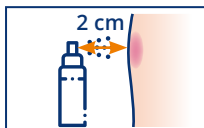

Menší rány



Větší rány

4. Sprej aplikujte jedním nebo dvěma stisknutími rozprašovače. Mezi jednotlivými nástřiky vyčkejte cca 10 sekund.
5. Polymer vytvoří voděodolnou vrstvu, která se z kůže a z rány mechanicky nestírá, proto stačí aplikace 1x za 24 hodin nebo 1x za 12 hodin, pokud to stav rány vyžaduje.
6. Před další aplikací stačí opět jen ránu opláchnout pod tekoucí vodou a osušit.
7. Před použitím spreje mechanicky nehtem nebo prstem odstraňte případné zbytky polymeru z rozprašovače, tak aby nebránily rozptylu spreje.





Výrobce:

VH Pharma a.s.

Jakubská 647/2

110 00 Praha 1

Česká republika

E-mail: vhpharma@vhpharma.cz

Distributor

TargaTeam a.s.

Šlikova 20

169 00 Praha 6

Česká republika

E-mail: info@targateam.cz

www.hemacut.cz

